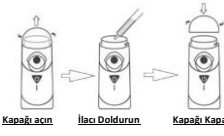
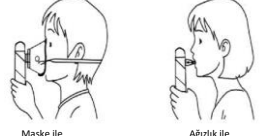


 Mesh Nebulizator  Kullanım Kılavuzu Taşınabilir Mesh Tipi Nebulizator		İçindekiler Tablosu <table> <tr><td>Giriş.....</td><td>01</td></tr> <tr><td>Güvenlik bilgileri ve Uyarılar.....</td><td>02-03</td></tr> <tr><td>Önemli Bilgiler.....</td><td>04</td></tr> <tr><td>Nebülizator-r hakkında bilgiler.....</td><td>05</td></tr> <tr><td>Spesifikasyonlar.....</td><td>06</td></tr> <tr><td>İlk kullanımlar.....</td><td>07</td></tr> <tr><td>Operasyon.....</td><td>08-11</td></tr> <tr><td>Temizlik ve dezenfeksiyon.....</td><td>12-14</td></tr> <tr><td>Sökme ve Depolama.....</td><td>15-16</td></tr> <tr><td>Sorun giderme.....</td><td>17-19</td></tr> <tr><td>Garanti bilgileri.....</td><td>20</td></tr> </table>	Giriş.....	01	Güvenlik bilgileri ve Uyarılar.....	02-03	Önemli Bilgiler.....	04	Nebülizator-r hakkında bilgiler.....	05	Spesifikasyonlar.....	06	İlk kullanımlar.....	07	Operasyon.....	08-11	Temizlik ve dezenfeksiyon.....	12-14	Sökme ve Depolama.....	15-16	Sorun giderme.....	17-19	Garanti bilgileri.....	20	Giriş Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Kullanmadan önce Lütfen Kullanım Kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun. Lütfen bu kullanımlar kılavuzunu ileride tekrar bakabilmek için uygun bir yerde saklayın. Nebülizator, üst ve alt solunum yollarını tedavi etmek için titreşimli bir ızgara nebulizördür. Doktor tarafından reçete edilen veya önerilen ilaçların nebulizasyonu ve solunması, solunum yolu hastalıklarını önleyebilir, bozuklukların yay etkilerini tedavi edebilir ve iyileşmeyi hızlandırabilir. Olasi uygulamalar hakkında daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışın. Cihaz evde veya hareket halindeyken solunum için uygundur. İlaçlar sadece doktor tarafından talimat verildiğinde kullanmalısınız. Solunum sakin ve rahat bir ortamda yapılmalıdır. İlacın küçük bronşlara akciğerlerin derinliklerine ulaşmasını sağlamak için yavaş ve derin nefes alın. Normal şekilde nefesinizi verin.	Güvenlik bilgileri ve uyarılar Uyarılar • Cihazı kullanmak, doktora danışmak veya tedavi almak yerine yapılacak bir işlem değildir. Herhangi bir ağrı veya hastalığınız olduğunda, her zaman önce doktorunuza danışınız. • Nebülizörü kullanırken, her zaman temel hijyen prosedürlerine uyun. • Sadece doktorunuz veya eczacınız tarafından reçete edilen veya önerilen ilaçları kullanın. • Her zaman kullanılabilecek ilacın türü ve solunum dozu, sıklığı ve süresi ile ilgili doktorunuzun talimatlarına uyun. • Cihaz düğün çalışmıyorsa veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız veya ağrı hissetmeye başlarsanız, cihazı hemen kullanmayı bırakın. • Bu cihaz, güvenliğin sorumluluğu bir kişi tarafından denetlenmediği veya talimat verilmemiş çocuklar veya sınırlı fiziksel, duyuşal (örneğin ağrıya duyarlılık) veya zihinsel yetenekleri olan kişiler veya cihazın güvenli çalışması için gerekli deneyim veya bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. • Herhangi bir sıvının cihaza nüfuz etmesi durumunda cihazı suya batırmayın, cihaz suya geçirilmesinden korunmak için tasarlanmıştır ve üretilemez. • Cihazı güçlü darbelerle karşı koruyun. • Her zaman ağır nebulizatorü ve ilaç kabı dahil cihazı kurutun.				
Giriş.....	01																													
Güvenlik bilgileri ve Uyarılar.....	02-03																													
Önemli Bilgiler.....	04																													
Nebülizator-r hakkında bilgiler.....	05																													
Spesifikasyonlar.....	06																													
İlk kullanımlar.....	07																													
Operasyon.....	08-11																													
Temizlik ve dezenfeksiyon.....	12-14																													
Sökme ve Depolama.....	15-16																													
Sorun giderme.....	17-19																													
Garanti bilgileri.....	20																													
Önemli • Güç kaybı, ani arızalar veya diğer olumsuz koşullar cihazı kullanılamaz hale getirebilir. Bu nedenle, yedek bir cihaz veya yedek ilaç bulundurunuz önerilir (doktorla görüşerek). • Hijyen nedeniyle, her kullanıcı kendi aksesuar setini (maske ve ağzık) kullanmalıdır. • Toz halinde herhangi bir ilaç kullanmayın (çözünmüş olsa bile). • Nebülizörü sallamayın çünkü bu, sıvının sızmaması neden olabilir, böylece cihaza zarar verebilir. • Akut acil durumlarda, ilk yardım önceliklidir. • İlaçların yanı sıra, sadece serum solüsyonu kullanın.	Önemli bilgiler Aksesuarlar Cihazın güvenli çalışması ancak üretici tarafından önerilen aksesuarlar kullanılıyorsa garanti edilebilir. Sızıntılara karşı koruma İlaç kabını ilaçla doldururken, maksimum işaret (8 ml) aşmadığınızdan emin olun. Önerilen dolun miktarı 2 ila 8 ml arasındadır. Kullanım sırasında, nebulizasyon işlevini veya tedavinin başarısını bozmadan cihazı herhangi bir yönde maksimum 45° açığa kadar eğebilirsiniz. Bununla birlikte, püskürtme sadece püskürtülen madde ızgara ile temas halinde ise gerçekleşir. Lütfen cihazı mümkün olduğunda dik tutmaya çalışın. Otomatik kapanma Cihaz 10 dakika kullanımdan sonra otomatik olarak kapanır. İlaç kabı boşsa cihazı kullanmayın.	Nebülizör hakkında bilgiler Genel bakış: 1. Nebülizator kafası 2. Bağlantı noktası 3. Açma/Kapatma düğmesi 4. Güç göstergesi LED'leri 5. İlaç kabı kapakı 6. İlaç kabı 7. İlaç kabı açma düğmesi 8. Ana ünite 9. Mikro USB bağlantı noktası Aksesuarlar: 10. İpli kafafta çanta 11. Yetişkin Maskesi 12. Çocuk maskesi 13. Ağzık 14. USB şarj kablosu	Spesifikasyonlar <table> <tr><td>Ürün İsmi</td><td>Mesh (ızgara)Nebulizator</td></tr> <tr><td>Teknoloji</td><td>Vibrasyonlu ızgara</td></tr> <tr><td>Parçacık boyutu (MMAD)</td><td>1-5 µm</td></tr> <tr><td>Artık Hacim</td><td>0.1 ml'den az</td></tr> <tr><td>Güç Kaynağı</td><td>Li-polimer pil (dahili) veya Mikro USB</td></tr> <tr><td>Güç Tüketimi</td><td>Yaklaşık 2.5W</td></tr> <tr><td>Titreşim Frekansı</td><td>Yaklaşık 110 KHz</td></tr> <tr><td>İlaç Kapasitesi</td><td>8 ml maks.</td></tr> <tr><td>Nebulizasyon Oranı</td><td>> 0.35 ml/dk</td></tr> <tr><td>Cihaz Boyutu</td><td>55(W) X40(D) X114(H) mm</td></tr> <tr><td>Cihaz Ağırlığı</td><td>Yaklaşık 100g, pil dahil</td></tr> <tr><td>Çalışma Koşulları</td><td>Sıcaklık: 3-40°C (yoğunlaşma yok) Bağıl Nem: Maks. 80% RH</td></tr> <tr><td>Depolama ve taşıma koşulları</td><td>Sıcaklık: -10-80°C (yoğunlaşma yok) Bağıl Nem: Maks. 80% RH</td></tr> </table> N: • Bu ürünü, isteğe bağlı aksesuarlarının ve pillerinin bertaraf, elektronik ürünlerin bertaraf için ulusal düzenlemelere uygun olarak yapılmalıdır. Yasadışı bertaraf çevre kirliliğine neden olabilir. • Bu cihaz diğer tıbbi/elektrikli ekipmanlarla veya yakınında kullanmak karşılıklı parazit neden olabilir. Doğru montajı yapın ve kullanımlar kılavuzunu okuyun. Yakındaki diğer tıbbi elektronik ekipmanların kullanımlar kılavuzlarını okuyunuzdan emin olun.	Ürün İsmi	Mesh (ızgara)Nebulizator	Teknoloji	Vibrasyonlu ızgara	Parçacık boyutu (MMAD)	1-5 µm	Artık Hacim	0.1 ml'den az	Güç Kaynağı	Li-polimer pil (dahili) veya Mikro USB	Güç Tüketimi	Yaklaşık 2.5W	Titreşim Frekansı	Yaklaşık 110 KHz	İlaç Kapasitesi	8 ml maks.	Nebulizasyon Oranı	> 0.35 ml/dk	Cihaz Boyutu	55(W) X40(D) X114(H) mm	Cihaz Ağırlığı	Yaklaşık 100g, pil dahil	Çalışma Koşulları	Sıcaklık: 3-40°C (yoğunlaşma yok) Bağıl Nem: Maks. 80% RH	Depolama ve taşıma koşulları	Sıcaklık: -10-80°C (yoğunlaşma yok) Bağıl Nem: Maks. 80% RH	İlk kullanımlar Önemli Cihazı ilk kez kullanımdan önce, tüm ambalaj malzemelerini çıkarın. Cihazın ve aksesuarların oda sıcaklığında olduğundan emin olun. Cihazı ambalajdan çıkarın. Henüz takılmamışsa, ilaç kabını ana üniteye takın: ilaç kabını, yerine oturduğuna duyan kadar ana ünitenin göğüsüne veya tabanına sıkça yerleştirin. Maskeyi / ağzık bağlantı noktasına sıkça bağlayın. Cihazı USB kabloluyla şarj etme USB kablosunu bir AC adaptörüne veya uygun bir güç kaynağına bağlayın (çıkış: 5.0 V, 1.0 A). AC adaptörünü uygun bir prize takın; USB kablosunu cihazın USB portuna takın. Daha sonra dahili Li-polimer pil şarj edilir. Not: Kabloyu, kimsenin üzerinden geçmeyeceği şekilde yerleştirin. •Kullanımdan sonra nebulizörü USB şarj kablosundan çıkarmak için önce cihazı kapatın ve ardından USB kablosunu Mikro USB bağlantı noktasından çıkarın. •Şarj sırasında, üç LED sırayla yanıp söner; tüm LED'ler yanmaya devam ettiğinde, pilin tamamen şarj olduğu anlamına gelir; cihaz her tam şarjdan sonra yaklaşık 80-100 dakika çalışabilir. Sadece nebulizasyon ihtiyaçları durumunda daha düşük LED ışıklarında cihazı şarj etmek daha iyi olabilir.
Ürün İsmi	Mesh (ızgara)Nebulizator																													
Teknoloji	Vibrasyonlu ızgara																													
Parçacık boyutu (MMAD)	1-5 µm																													
Artık Hacim	0.1 ml'den az																													
Güç Kaynağı	Li-polimer pil (dahili) veya Mikro USB																													
Güç Tüketimi	Yaklaşık 2.5W																													
Titreşim Frekansı	Yaklaşık 110 KHz																													
İlaç Kapasitesi	8 ml maks.																													
Nebulizasyon Oranı	> 0.35 ml/dk																													
Cihaz Boyutu	55(W) X40(D) X114(H) mm																													
Cihaz Ağırlığı	Yaklaşık 100g, pil dahil																													
Çalışma Koşulları	Sıcaklık: 3-40°C (yoğunlaşma yok) Bağıl Nem: Maks. 80% RH																													
Depolama ve taşıma koşulları	Sıcaklık: -10-80°C (yoğunlaşma yok) Bağıl Nem: Maks. 80% RH																													
Operasyon Nebülizatorün hazırlanması Hijyen nedeniyle, nebulizör ve beraberindeki aksesuarların her kullanımdan sonra temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi zorunludur. Terapi, farklı ilaçların birbiri ardına solunmasını gerektiriyorsa, nebulizörün her uyguladından sonra durulandığından ve temizlendiğinden emin olun. Nebülizatorün doldurulması Kapakı çıkarmak için ilaç kabını saat yönünün tersine döndürerek açın ve ilaç kabını ilaçla doldurun. Aşırı doldurmayın. Önerilen maksimum dolun seviyesi 8 ml'dir. İlaç sadece bir doktorun tavsiyesi üzerine kullanımlar ve uygun inhalasyon süresi ve ihtiyaçların miktarını kontrol edin. İlacın önerilen dozu 2 ml'den az ise, bu miktarı sadece izotonik salin çözeltisi kullanılarak en az 4 ml'ye kadar doldurun. Visköz ilaçlar da seyreltme gerektirebilir. Her zaman doktorunuzun talimatlarına uyun. İlaç kabını kapatmak için kapakı resetleyin.	 Kapakı açın İlaçla Doldurun Kapakı Kapatın Bağlantı aksesuarları • Genel aksesuarları (ağzık, yetişkin maskesi veya çocuk maskesi) cihaza takın. • Şimdi maskeli burnunuza ve ağzınıza düğün bir şekilde yerleştirin veya ağzığa ağzınıza düğün bir şekilde yerleştirin. • Güç düğmesine basarak cihazı çalıştırın. Tedaviyi durdurmak istiyorsanız, gücü kapatmak için düğmeye tekrar basın. • Cihazdan gelen sprey sis ve ışık LED ışığı (Açma/Kapama düğmesi) cihazın mükemmel çalıştığını gösterir.	Doğru soluma • Solunum tekniği: doğru solunum tekniği, parçacıkların hava yollarına birlikte, ilaç kabı soğutmadan olduğu için çok hafif bir şekilde akciğerlere girebilmelerini sağlamak için önemlidir. Yavaş ve derin nefes alınmaz, nefesinizi kısa bir süre tutmanız (5-10 saniye) ve sonra hızlı bir şekilde nefes vermeniz gerekir. • Sadece doktorunuz tarafından tavsiye edilirse solunum bozukluklarını tedavi etmek için nebulizator kullanmalısınız. Doktorunuz ilacı ve solunum tedavisi için gerekli uygulamayı önercektir. • Bazı ilaçlar sadece reçete ile kullanılabilir.  Maskle İle Ağzık İle	Not: Cihaz mümkün olduğunca dik hale getirmelisiniz. Bununla birlikte, ilaç kabı soğutmadan olduğu için çok hafif bir şekilde eğilmesi işlevini etkilemez. Cihazın tam olarak çalıştığından emin olmak için, kullanımlar sırasında ilacın ızgara ile temas ettiğinden emin olun. Önemli Uçucu yağlar, öksürük ilaçları, gargara için tasarlanmış çözümler ve cilde uygulanan veya buhar banyolarında kullanılmak için damlalar, nebulizator kullanılarak solunum için uygun değildir. Bu maddeler genellikle yüksek viskoziteye sahiptir ve cihazın doğru işlevini bozarlar ve bu nedenle uzun vadede kullanımların etkinliğini etkileyebilir. Bronşiyal sistemin aşırı duyarlılığı durumunda, uçucu yağlar içeren ilaçlar bazen akut bronşiyospazma neden olabilir (nefes darlığı eşliğinde bronşların anı, kramp benzeri sıkışması). Her zaman doktorunuza veya eczacınıza danışın. Sadece doktorunuz tarafından reçete edilen ilaçları, sağlık uzmanınızın yönlendirdiği şekilde kullanın. • Tedaviden sonra, açma/kapama düğmesini kullanarak cihazı kapatın, gösterge ışığı söner. • Teknik nedenlerden dolayı, ilaç kabında küçük bir miktar kalabilir. Kullanmayın.	Temizlik ve dezenfeksiyon Uyarılar • Herhangi bir sağlık riskinden kaçınmak için aşağıdaki hijyen talimatlarına uyun. • Nebülizör ve aksesuarları çoklu kullanımlar için tasarlanmıştır. Temizlik gereksinimlerini farklı uygulamalar alanlarına göre farklılık gösterdiğini lütfen unutmayın: Not: Izgaraya veya aksesuarları ırgıralara veya benzerleriyle temizlemeyin, onarılamaz hasara neden olabilir, bu da tedavinin amaçlarını sonucunun artık garanti edilemediği anlamına gelir. Yüksek riskli gruplarda (örneğin küçük fibrozu hastalar) gerekli hijyenik preparatlarla (el yıkama, ilaçların kullanımlar veya inhalasyon solüsyonları) ilgili ek gereksinimler için doktorunuza başvurun. Temizleme Nebülizator ve kullanılan aksesuarlar, örneğin ağzık, maske, ilaç kabı vb. akan su ile temizlenmeli ve her kullanımdan sonra iyice kurutulmalıdır. Tüm bileşenler tamamen kuruduktan sonra, bir araya getirin ve kuru, kapalı bir kaba yerleştirin. • Nebülizatorün aksesuarları çıkarın.																										
• İlaç kabına 6 ml temiz su ekleyin ve önce herhangi bir ilaç kalıntısını ızgaradan çıkarmak için cihazı açın. (Lütfen tüm sıvıyı püskürtün). • Maske, ilaç kabı çıkartılabilir parçaları cihazdan çıkarın. Önemli • Çalışan güçlü su altında temizlemek için tüm cihazı veya nebulizator ünitesini asla suya batırmayın. • Temizlerken, tüm kalıntıları çıkarıldığından ve tüm parçaları dikkatlice kurutulduğundan emin olun. Cilt veya mukozalar ile temas ettiğinde veya yutulduğunda veya solunduğunda zehirli olabilecek herhangi bir madde kullanmayın. • Her bir parçanın, özellikle titreşimli ızgara ve altın kontakların tamamen kurutulmaması, nebulizatorün klinik etkinliğini etkilemeye başlayabilir.	Dezenfeksiyon Not: Mesh nebulizator sadece su ile temizlenmelidir. • Önce nebulizator kabını ve aksesuarları temizleme bölümünde açıkladığı gibi temizleyin. Daha sonra dezenfeksiyonu ile devam edebilirsiniz. • İlaç kabına 6 ml Benzalkonyum Bromür (%0.1) dökün. Kapağı kapatın. En az 10 dakika boyunca kapta bırakın. • Daha iyi dezenfeksiyonu için cihazı zaman zaman hafifçe sallayın. Çözeltinin dökülmesini önlemek için kapağın düğün bir şekilde sabitlendiğinden emin olun. • Daha sonra, Benzalkonyum Bromürü ilaç kabından dökün. • Bu işlemi iki kez tekrarlamak için su kullanın. Not: Benzalkonyum Bromürü alternatif olarak, su ve sirke çözeltisi kullanılabilir. Temiz su ile iyice durulayın ve kurulaayın.	Sökme ve Depolama Sökme Bireysel bileşenlerini temizlemeye devam etmek için nebulizatorü sökün. Serbest bırakma düğmesine işle doğru basarak ve ilaç kabını yukarı doğru çekerek ilaç kabını çıkarın. İzgaraya dokunmadığınızdan emin olun, çünkü bu onu tahrip edebilir. Izgara doğrudan akan su altında yıkamamaz, aksi takdirde örgü hasar görebilir. • Cihaz ve nebulizatorde herhangi bir tıbbi solüsyon veya yabancı maddeniz kalırsa, bunları çıkarmak için pamuklu çubuklar kullanın. • Izgaranın dışını ve ilaç kabının dışını pamuklu çubuk veya yumuşak temiz kumaşla temizleyin. Kurulumla • Tek tek bileşenleri kuru, temiz ve emici bir yüzeyi yerleştirin ve tamamen kurumasını bekleyin (en az 2 saat). Not: • Temizlendikten sonra tüm parçaları iyice kurutulduğundan emin olun, aksi takdirde bakteri üreme riski artar. • Tüm bileşenler tamamen kurutulduktan sonra, nebulizörün tekrar monte edin ve bileşenleri kuru, kapalı bir kaba yerleştirin.	Malzeme Direnci • Bir temizleyici veya dezenfektan seçerken, aşağıdakilere dikkat edin: Sadece üretici tarafından önerilen miktarlarda hafif temizlik veya dezenfektan maddeleri kullanın. • Tüm plastik bileşenlerde olduğu gibi, aksesuarların sık kullanımı ve temizlenmesi belirli bir miktarda aşınmaya neden olabilir. Zamanla, bu aerosol özelliklerini değiştirebilir ve sonunda tedavinin etkinliğini etkileyebilir. Bu nedenle, nebulizator kafasını ve aksesuarlarını yılda en az bir kez değiştirmenizi öneririz. Depolama • Nebülizörü nemli bir ortamda (örneğin banyoda) saklamayın veya nemli nesnelerle birlikte taşımayın. • Nebülizörü doğrudan güneş ışığından uzak tutun ve güneş ışığından uzakta taşıyın.	Arıza giderme <table> <tr> <th>Problem / Sorun</th><th>Olası Neden / Çözüm Ve Çare</th></tr> <tr> <td rowspan="4">Nebülizör az miktarda aerosol üretmekte veya hiç üretmemekte</td><td>1. İlaç, bardağında çok az ilaç var.</td></tr> <tr> <td>2. Nebülizör dik konumda tutulmamakta.</td></tr> <tr> <td>3. İlaç püskürtme için uygun değildir (örneğin, çok kalın, yüksek viskoziteli).</td></tr> <tr> <td>İlaç çözeltisi doktorunuz tarafından belirtilmemiştir.</td></tr> <tr> <td rowspan="2">Nebülizör az miktarda aerosol üretmekte veya hiç üretmemekte</td><td>4. Pili tükennmiş. Cihazı şarj etmek için güç kaynağına bağlayın ve tekrar deneyin.</td></tr> <tr> <td>5. Izgara üzerindeki parçacıklar çıkışı engelliyor.</td></tr> <tr> <td></td><td>Bu bir parçacıkların çıkarmak için, ilaç kabını 2-3 damla sirke ve 3-6 ml su ile doldurun ve ardından bu çözeltiyi tamamen nebulize edin. Lütfen bu spreyi teneffüs etmeyin ve daha sonra ilaç kabını temizlediğinizden ve dezenfekte ettiğinizden emin olun.</td></tr> </table>	Problem / Sorun	Olası Neden / Çözüm Ve Çare	Nebülizör az miktarda aerosol üretmekte veya hiç üretmemekte	1. İlaç, bardağında çok az ilaç var.	2. Nebülizör dik konumda tutulmamakta.	3. İlaç püskürtme için uygun değildir (örneğin, çok kalın, yüksek viskoziteli).	İlaç çözeltisi doktorunuz tarafından belirtilmemiştir.	Nebülizör az miktarda aerosol üretmekte veya hiç üretmemekte	4. Pili tükennmiş. Cihazı şarj etmek için güç kaynağına bağlayın ve tekrar deneyin.	5. Izgara üzerindeki parçacıklar çıkışı engelliyor.		Bu bir parçacıkların çıkarmak için, ilaç kabını 2-3 damla sirke ve 3-6 ml su ile doldurun ve ardından bu çözeltiyi tamamen nebulize edin. Lütfen bu spreyi teneffüs etmeyin ve daha sonra ilaç kabını temizlediğinizden ve dezenfekte ettiğinizden emin olun.														
Problem / Sorun	Olası Neden / Çözüm Ve Çare																													
Nebülizör az miktarda aerosol üretmekte veya hiç üretmemekte	1. İlaç, bardağında çok az ilaç var.																													
	2. Nebülizör dik konumda tutulmamakta.																													
	3. İlaç püskürtme için uygun değildir (örneğin, çok kalın, yüksek viskoziteli).																													
	İlaç çözeltisi doktorunuz tarafından belirtilmemiştir.																													
Nebülizör az miktarda aerosol üretmekte veya hiç üretmemekte	4. Pili tükennmiş. Cihazı şarj etmek için güç kaynağına bağlayın ve tekrar deneyin.																													
	5. Izgara üzerindeki parçacıklar çıkışı engelliyor.																													
	Bu bir parçacıkların çıkarmak için, ilaç kabını 2-3 damla sirke ve 3-6 ml su ile doldurun ve ardından bu çözeltiyi tamamen nebulize edin. Lütfen bu spreyi teneffüs etmeyin ve daha sonra ilaç kabını temizlediğinizden ve dezenfekte ettiğinizden emin olun.																													
<table> <tr> <th>Problem / Sorun</th><th>Olası Neden / Çözüm Ve Çare</th></tr> <tr> <td>Nebülizör az miktarda aerosol üretmekte veya hiç üretmemekte</td><td>6. Izgarayı yıpratmış. İlaç kabını değiştirin. 7. İlaç kabı tamamen boşaltılmış. İlaç kabını doğru şekilde takın ve yeniden çalıştırın. 8. Izgaranın diğ yüzeyinde su var. Suyu hafifçe çıkarmak için yumuşak temiz kumaş veya pamuk kullanın.</td></tr> </table>	Problem / Sorun	Olası Neden / Çözüm Ve Çare	Nebülizör az miktarda aerosol üretmekte veya hiç üretmemekte	6. Izgarayı yıpratmış. İlaç kabını değiştirin. 7. İlaç kabı tamamen boşaltılmış. İlaç kabını doğru şekilde takın ve yeniden çalıştırın. 8. Izgaranın diğ yüzeyinde su var. Suyu hafifçe çıkarmak için yumuşak temiz kumaş veya pamuk kullanın.	<table> <tr> <th>Problem / Sorun</th><th>Olası Neden / Çözüm Ve Çare</th></tr> <tr> <td>Bebekler ve çocuklar için hangi özel admalar atılmalıdır?</td><td>1. Maske, etkili solunumu garanti etmek için ağız ve burnu örtmelidir. 2. Bebekler ve çocuklar cihazı sadece bir yetişkinin yardımı ve gözetimi altında kullanmalıdır. Bir çocuğu asla nebulizatorle yalnız bırakmayın.</td></tr> <tr> <td>Her kullanıcının kendi aksesuarlarına ihtiyacı var mı?</td><td>Bu hijyen nedenleriyle kesinlikle gereklidir.</td></tr> </table>	Problem / Sorun	Olası Neden / Çözüm Ve Çare	Bebekler ve çocuklar için hangi özel admalar atılmalıdır?	1. Maske, etkili solunumu garanti etmek için ağız ve burnu örtmelidir. 2. Bebekler ve çocuklar cihazı sadece bir yetişkinin yardımı ve gözetimi altında kullanmalıdır. Bir çocuğu asla nebulizatorle yalnız bırakmayın.	Her kullanıcının kendi aksesuarlarına ihtiyacı var mı?	Bu hijyen nedenleriyle kesinlikle gereklidir.	Garanti Bilgileri Nebülizör dikkatli bir şekilde üretilmiş ve test edilmiştir ve ışıclık ve malzeme kusurlarından anımsı olduğu garanti edilmektedir. Bu garanti kapsamında, yükümlülüğümüz, orijinal satın alma tarihinden itibaren iki yıl içinde kusurlu olduğu kanıtlanan ünitelerin değiştirilmesi veya onarımı ile sınırlı olacaktır. Bu garanti, sonraki herhangi bir alıcıya veya şahıba devredilemez. Bu garanti, normal aşınmaya maruz kalan ve periyodik olarak değiştirilmesi gereken (ilaç kabı, ağzık, maskeler) dayandıkları olmayan bileşenler için geçerli değildir. Bu ürünün kullanımlar kılavuzunda belirtilen kullanımlar amacı dışında herhangi bir kullanımlar, kötüye kullanımlar, ihmâl, kaza veya yetkili bir servis uzmanından başka bir kişi tarafından yapılan onarımlar bu garantiyi derhal geçersiz kılacaktır. Alandaki onarımlar sırasında yapılan masraflar, parçalar ya da haramcılar için tazminat veya ücret almayacağız. Yukarıdaki garanti münhasırdır ve diğer tüm açık garantilerin yerine geçer. Varsa, satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, zımni garantiler, burada sağlanan açık garantinin süresini aşmayacaktır.	Hiçbir durumda, biz veya bağlı kuruluşlarımız, kullanımlar veya kar kaybı veya diğer teminat ve özel veya dolaylı zararlarდან sorumlu değildir. Cihazı asla aşmayın ya da cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayınız aksi takdirde gerekli işlevi artık garanti edilemez. Bu Yönetmeliğe uymaması garantiyi geçersiz kılacaktır. Cihazı tamir etmeniz gerekiyorsa, ekipman sağlایınıza başvurun. Garanti Süresi Satın alım tarihinden itibaren 2 yıldır. Not: Bunun için satın alınan garanti belgesi doğru ve eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir. Aksi halde cihaz garanti kapsamına almaz.	Garanti Belgesi Ürün adı: Seri no : Satıcı Kurum : Kaşe - İmza - Tarih İthalatçı Firma : Devamed İlaç ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti. Adres: Fevzi Çakmak Mh. Atılgan cad. No: 154/B Esneler - İSTANBUL / TÜRKİYE Web: www.devamed.com İletişim : info@devamed.com Belge Basım Tarihi : 15.09.2020																
Problem / Sorun	Olası Neden / Çözüm Ve Çare																													
Nebülizör az miktarda aerosol üretmekte veya hiç üretmemekte	6. Izgarayı yıpratmış. İlaç kabını değiştirin. 7. İlaç kabı tamamen boşaltılmış. İlaç kabını doğru şekilde takın ve yeniden çalıştırın. 8. Izgaranın diğ yüzeyinde su var. Suyu hafifçe çıkarmak için yumuşak temiz kumaş veya pamuk kullanın.																													
Problem / Sorun	Olası Neden / Çözüm Ve Çare																													
Bebekler ve çocuklar için hangi özel admalar atılmalıdır?	1. Maske, etkili solunumu garanti etmek için ağız ve burnu örtmelidir. 2. Bebekler ve çocuklar cihazı sadece bir yetişkinin yardımı ve gözetimi altında kullanmalıdır. Bir çocuğu asla nebulizatorle yalnız bırakmayın.																													
Her kullanıcının kendi aksesuarlarına ihtiyacı var mı?	Bu hijyen nedenleriyle kesinlikle gereklidir.																													